



# FUTURO™ ENKELSTABILISATOR

46645



STEVIGE  
STEUN



ADEMEND  
MATERIAAL



VOCHTREGULEREND

Helpt bij het stabiliseren en ondersteunen van een zwakke, pijnlijke of geblesseerde enkel.

## IDEAAL VOOR:

Ondersteuning bij veelvoorkomende blessures, zoals verstuiking en overbelasting

## HOOFDKENMERKEN:

- 1 Versterkte stabilisator aan de zijkant helpt het verdraaien van de enkel en nieuwe blessures te voorkomen.
  - 2 Instelbare compressie voor een pasvorm op maat.
  - 3 Enkelriemen ondersteunen en tillen de voetboog op.
- Past gemakkelijk in uw schoen.

## MAAT:

Referentie	CNK	CM
46645	2251676	20.3-25.4



## DRAAGINSTRUCTIES:



Open alle haak-en-lus-sluitingen en glijd de voet in de stabilisator. Breng de bovenste band aan door de gesp, trek aan en maak vast. De pasvorm dient stevig, maar comfortabel aan te voelen.



Trek het linker voetriempje over de voet en bevestig de haaksluiting aan de tegenovergestelde zijde van de enkelstabilisator.



Volg dezelfde werkwijze voor het rechter voetriempje. Pas de beide riempjes aan totdat de pasvorm rond de onderkant van de voet stevig, maar comfortabel aanvoelt.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro



Beoogd gebruik: Ondersteuning van een stijve, pijnlijke of geblesseerde enkel.

Samenstelling: Polyethyleen, Nylon, Polyurethaan, Polyester, Spandex.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.