



FUTURO™ OMKEERBARE POLSSPALK

47853-55



ADEMENDE
MATERIALEN

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

*Artsen raden vaak het gebruik van een rigide polsbrace aan voor behandeling van carpal tunnel-syndroom en andere pijnlijke polsaandoeningen.

Samenstelling: Urethaanschuim, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethaan Adhesief.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Stabiliseert en ondersteunt pijnlijke, zwakke of geblesseerde polsen.

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning bij veelvoorkomende blessures, zoals verstuikingen, overbelasting en symptomen van carpal tunnel-syndroom*

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Omkeerbare spalk voor de rechter- of linkerhand.
- 2 Mouwontwerp met drie riemen voor een verstelbare pasvorm.
- 3 Palmstabilisator voor gemiddelde stabilisatie.

MAAT:

Referentie	CNK	Maat	CM
47853	2251486	S	12.7-15.9
47854	2251478	M	15.9-19.0
47855	2251460	L	19.0-22.9




Zowel links als rechts te dragen.

DRAAGINSTRUCTIES:



Open de sluitingen. Schuif uw hand in de brace met de metalen spalk over uw handpalm.

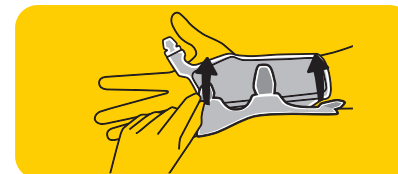

Sluit eerst de middelste riem en vervolgens de overige riemen.



Bevestig de duimriem aan de andere kant van uw hand. Verstel alle riemen totdat de brace strak maar comfortabel zit.



Voor gebruik aan de linkerhand: Schuif de spalk uit het zakje. Houd de spalk stabiel, draai de brace en schuif de spalk in de opening van het andere vakje. Steek het uiteinde van de spalk in het vakje. Volg de draaginstructies hierboven.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

